

ZWACHTELINSTRUCTIE MOBIDERM

Mobiderm zwachtels zijn toepasbaar voor benen en armen.

Benodigheden:

- Katoenen rekwachtel
- Mobiderm-zwachtel
- Biflexideal-zwachtel korte rek
- Biflex Practic (16+ of 17+) mediumrek ($\pm 150\%$)

Stap 1:

Zwachtel het katoenen verband met matige druk om het lichaamsdeel. Zwachtel met 2 cm overlap. Controleer na afloop de mobiliteit.



Stap 2:

Zwachtel het Mobiderm verband om het been/arm met een overlap van 1 blokje. Leg bij de knie/elleboog het Mobiderm-verband aan in een kruis of een halve overlap. Controleer na afloop de mobiliteit.



Stap 3:

Zwachtel het Biflexideal onder lichte druk. Strijk het verband na. Controleer na afloop de mobiliteit.



Stap 4:

Bij een korte-rekverband zwachtel je nogmaals met de Biflexideal.

Dagverband

Bij een lange-rekverband, zwachtel Biflex 16+ of 17+ of gebruik de medium-rekwachtel Biflex 16+ of 17+ practic. Leg de lus van het Biflex om de hand of de voet en maak een keuze op welke overlap-lijn gezwachteld gaat worden. Leg bij elke volgende laag de rand van de volgende laag op de overlap-lijn en zwachtel met een druk, totdat het rechthoek zich tot een vierkant vormt. Controleer na afloop de mobiliteit.





ZWACHTELEN MET MOBIDERM

Indicatie: Reductie van veneus- en lymfoedeem.

Werking: Mobiderm zorgt voor drukverschillen op de huid, wat oedeem snel en effectief reduceert.

BENODIGDHEDEN



FIXATIE HUIDBESCHERMING

KATOENEN KORTE-REKZWACHTEL

Rigide katoenen zwachtel

Indirect contact met de huid zorgt deze zwachtel voor een goede fixatie. Deze zachte, gevoerde katoenen zwachtel biedt bescherming voor de door lymfoedeem verzwakte huid.



DRAINAGE VAN HET OEDEEM

MOBIDERM

Mobilisatieverband

Door Mobiderm onder een reducerend verband te gebruiken, wordt oedemateus of verhard subcutaan weefsel gemobiliseerd. Het wordt aangebracht bovenop het eerste cutane beschermingsverband.



RETENTIE

BIFLEXIDEAL®

Korte-rekzwachtel

Een korte-rekzwachtel (<100% stretch) als derde laag garandeert reductie van het oedeem en doeltreffende drainage in geval van lichaamsbeweging.

In geval van ernstig lymfoedeem bij actieve patiënten, kan de rigiditeit worden versterkt met een extra laag.

Ernstig oedeem bij patiënten met verminderde mobiliteit of weinig motivatie voor de behandeling



COMPRESSIE

BIFLEX

Elastische zwachtel

Voor actieve compressie en voor reductie van oedeem, zelfs in geval van verminderde mobiliteit, wordt een vierde zwachtel gebruikt. Deze mag alleen overdag worden gedragen.



MULTI-TYPE VERBANDEN

HUIDBESCHERMING



Katoenen korte-rekzwachtel

Niet-elastisch anti-oedeemverband

Samenstelling: 100% katoen.

Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
11 cm	4 m	Wit	15520056



Beschermende schuimverband

Dun rekverband van foam

Bescherming van huidoppervlak.

Breedte	Lengte	Kleur	Artikelnummer
7 cm	27 m	Wit	5507091000

REDUCTIE



Biflexideal®

Korte-rek compressieverband

65% stretch en kracht van 45 cN/cm.


Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
3 cm	5 m	Wit	16135725
6 cm			15686914
8 cm			15686922
10 cm			15686930



Biplast

Adhesief compressieverband


Kleefkracht in meerdere richtingen tot de rand van het verband.

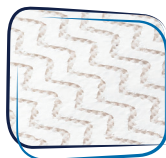

Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
3 cm	2,5 m	Wit	13624792
6 cm			13624806
8 cm			13624814
10 cm			13624822
15 cm			15502449
20 cm			15502457



MOBIDERM VERBANDEN

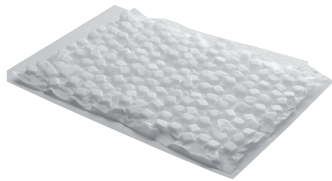


MOBIDERM pads

Afmetingen	Omschrijving	Z-index
25 cm x 1 m	Kleine blokjes (5 mm x 5 mm)	15778649
25 cm x 25 cm	Kleine blokjes (5 mm x 5 mm)	16593693
25 cm x 1 m	Grote blokjes (15 mm x 15 mm)	15778657



MOBIDERM verband

Afmetingen	Omschrijving	Z-index
10 cm x 3 m	Grote blokjes 15 mm x 15 mm	15778665

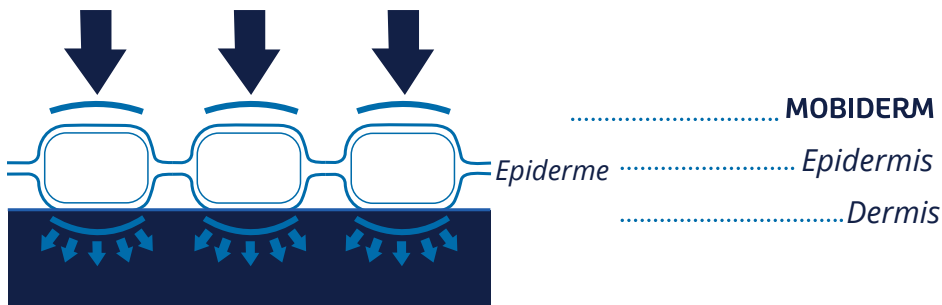

MOBIDERM IS EEN HIGHTECH MOBILISATIE COMPRESSIEHULPMIDDEL

EFFECTIEF

- Snelle reductie van het oedeemvolume.
- Verzacht de fibrotische, sclerotische of oedemateuze huid.

PRAKTISCH

- Licht, comfortabel en flexibel. Zorgt dat de patiënt zijn bewegingsvrijheid behoudt en door mobiliteit wordt het drainagevermogen vergroot.

COMFORTABEL

- Zacht
- Eenvoudig aan te brengen.



Kleine blokjes

- Doeltreffend op gebieden met een klein oppervlak, zoals vingers, handrug en voetrug.



Grote blokjes

- Doeltreffend op grote oppervlakten, zoals been, romp, arm of genitale zone.




ELASTISCHE COMPRESSIE

EENVOUD, DANKZIJ DRUKINDICATOREN EN OVERLAP-LIJNEN

Medium-rekzwachtel elastische zwachtel met drukindicatoren

Tweerichting elastisch gewoven zwachtel.

Nauwkeurige controle van de uitgeoefende druk dankzij de drukindicatoren (ijktokens voor de spanning van het verband) en de overlap-lijnen.

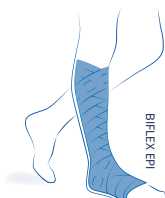

Versies:


- BIFLEX 16+ (light) - BIFLEX 17+ (strong)
- BIFLEX EPI 16+

Omschrijving	Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
BIFLEX 16+ LIGHT	8 cm	3 m	Beige	13624458
		3,5 m		15735710
		4 m		13624474
		5 m		15735729
	10 cm	3 m	Beige	15735583
		3,5 m		15735605
		4 m		15735621
		5 m		15735664
BIFLEX 17+ STRONG	8 cm	3 m	Beige	13624539
		4 m		13624555
	10 cm	3 m	Beige	13624547
		3,5 m		15735893
		4 m		13624563
		5 m		15735907
BIFLEX EPI 16+ LIGHT	8 cm	7 m	Beige	15736245



BIFLEX AANBRENGEN IN TWEE SIMPELE STAPPEN


1 REKINDICATOREN

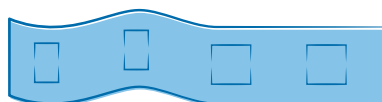

RECHTHOEK → VIERKANT


2 OVERLAP-LIJNEN

BIFLEX 16+

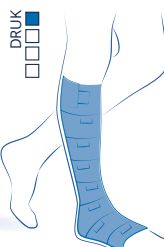


**HALF-
OVERLAPPENDE
VIERKANTEN**
(Force 1)

BIFLEX 16+

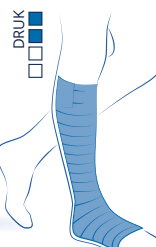

**VOLLEDIG
OVERLAPPENDE
VIERKANTEN**
(Force 2)

BIFLEX 17+

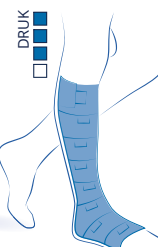

**HALF-
OVERLAPPENDE
VIERKANTEN**
(Force 1)



MULTI-TYPE ZWACHTELS

ELASTISCHE COMPRESSIEZWACHTEL

BIFLEX+ PRATIC

Gradueel medium-rekzwachtels met drukindicatoren

Met een handige lus om je bandage mee op te starten.



Omschrijving	Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
BIFLEX 16+ PRATIC LIGHT	8 cm	3 m	Beige	13624407
		4 m		13624423
	10 cm	3 m	Beige	13624504
		4 m		13624431
BIFLEX 17+ PRATIC STRONG	10 cm	3 m	Beige	15736059
		4 m		15736067



PRATIC-VERBAND

Gebruiksvriendelijk, geeft de patiënt autonomie, kan worden aangebracht door gezinsleden, tijdwinst voor thuiszorg- en ziekenhuispersoneel.

- Schuif de voet in de verband.
- Naad boven op de voet.
- 1e slag rond de hiel.
- 2e slag vastzetten vanaf de onderkant.
- 3e slag vastzetten vanaf de bovenkant.
- Volg de overlaplijnen en rek de rechthoeken uit tot vierkanten.

BIFLEX ACCESSOIRES



KLITTENBANDSLUITING

Verpakking	Artikelnummer
4 klittenbandsluitingen	5903 091 000



POLSTERING

SCHUIMVERBAND

Geëmulgeerd latex foam

Voor het polsteren van lichaamsdelen.

De afgebogen snijrand maakt het mogelijk het schuimverband overlappend te zwachtelen.

Dankzij de open celstructuur van het foam is het verband luchtdoorlatend en beperkt het de risico's van wondmaceratie.



Dikte	Breedte	Lengte	Z-index
8 mm	8 cm	1 m	16593340
	10 cm		16593367
12 mm	10 cm	1 m	16593405

VARICO

Latex foampad

Voor polsteren van lichaamsdelen.

Dankzij de open celstructuur van het foam is de pad luchtdoorlatend en beperkt het de risico's van wondmaceratie.

Model	Afmetingen	Verpakking	Z-index
0	63 mm x 87 mm	2 stuks	16593472
1	70 mm x 132 mm	1 stuk	16593634
2	125 mm x 164 mm	1 stuk	16593642
3	200 mm x 250 mm	1 stuk	16593650
4	343 x 230 x 360 mm (trapezevorm)	1 stuk	16593669




MOBIDERM:

Bewezen effectief compressiesysteem

EIGENSCHAPPEN

Mobiderm is een medisch hulpmiddel voor behandeling van lymfoedeem. Het wordt ingezet als nachtbehandeling tijdens de onderhoudsfase.

Mobiderm zorgt voor drukverschillen op de huid door de specifiek ontworpen blokkenstructuur. Hierdoor wordt de drainage van lymfevocht geoptimaliseerd. In meerdere Europese studies is het effect van dit compressiesysteem onderzocht.

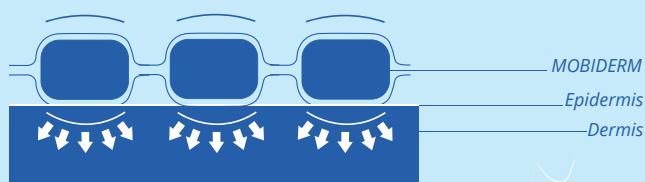


MOBIDERM IS VERKRIJGBAAR IN

- Verbandmiddel
 - Compressiesysteem
- Voor onderbeen, been en arm
In maatwerk en confectie



MARILYN-STUDIE ⁽¹⁾

In dit onderzoek is het effect van de Mobiderm nachtcompressie onderzocht tijdens de onderhoudsfase voor behandeling van lymfoedeem na borstkanker. Groep I startte met Mobiderm op dag 0 en groep II op dag 30 van de onderhoudsfase. Resultaten werden vergeleken op dag 30 en dag 90.

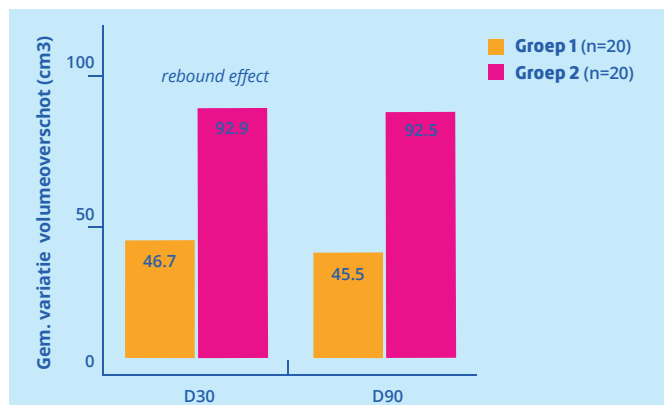

Gemiddelde toename lymfoedeemvolume ten opzichte van D0

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE

Mobiderm nachtcompressie beperkt het vroege rebound effect van het oedeem tijdens de onderhoudsfase bij lymfoedeem na borstkanker.

CLINICAL USE OF A NIGHT-TIME MOBIDERM GARMENT ⁽²⁾

In dit onderzoek is het lange-termijneffect (6 maanden) van Mobiderm nachtcompressie beoordeeld. Het effect is onderzocht bij 145 patiënten met lymfoedeem als gevolg van borstkanker.

Deze studie heeft de grootste populatie en de langste onderzoeksperiode binnen studies naar compressiehulpmiddelen gedurende de nacht. De primaire uitkomstmaat is het verschil in omtrek tussen aangedane en gezonde arm.



Omvangsverschil armen na start Mobiderm (n=145)

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE

Mobiderm nachtcompressie vermindert significant het volume in de arm bij lymfoedeem als gevolg van borstkanker (- 6,6% na 6 maanden).

- (1) Clinical Study to Assess Safety and Efficacy of a New Armsleeve in the Management of Arm Lymphoedema (MARILYN)
- (2) Clinical use of a Night-Time MOBIDERM Garment as a Treatment Modality for Breast Cancer-Related Lymphedema: A Retrospective Longitudinal Cohort Study

MEER WETEN?

T: 033 247 44 44
E: INFO@THUASNE.NL