




LYMPHATREX®

Thoraxbandage
Gebruiksaanwijzing

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt telefonisch of via mail
contact met ons opnemen.

THUASNE Benelux
Thuasne Benelux
Klompemaker 1-3
3861SK Nijkerk
033- 247 44 44
lymphatrex@thuasne.nl

 Made in Germany

990050000810_NL_0717

Gebruiksaanwijzing LYMPHATREX® thoraxbandage

Beste gebruiker/gebruikster van de Thuasne Thoraxbandage,

Vandaag heeft u uw Thoraxbandage ontvangen, omdat u (pijn)klachten heeft die veroorzaakt worden door lymfoedeem op het bovenlichaam.

De thoraxbandage geeft compressie op het lichaam, deze compressie kan ervoor zorgen dat uw klachten verminderen. Voor een optimale therapie en werking van de thoraxbandage adviseren wij u om de thoraxbandage dagelijks meerdere uren te dragen. Na verloop van tijd kunt u in overleg met uw therapeut of bandagist onderzoeken hoeveel tijd u het beste de thoraxbandage kan dragen voor behoud van vermindering van uw klachten.

Thoraxbandages zijn naar maat gemaakt en zijn bij dagelijks gebruik door veelvuldig wassen en dragen aan natuurlijke slijtage onderhevig. Dit zal de compressie doen verminderen.

Het is raadzaam om na een half jaar en in ieder geval uiterlijk na een jaar een controleafspraak te maken om zeker te zijn dat de thoraxbandage nog naar behoren functioneert.

Om hygiënische redenen wordt het afwisselend dragen van twee thoraxbandages geadviseerd.

Als uw omvangsmaten erg veranderd zijn, kan de functionaliteit en het draagcomfort verminderen. Bent u nog onder behandeling bij

uw therapeut, neem dan contact op met uw therapeut voor een controleafspraak. Bent u niet meer onderbehandeling bij een therapeut dan kunt u rechtstreeks met Thuasne contact opnemen.

De druk die een thoraxbandage geeft op het lichaam kan in het begin wennen zijn. Mocht u ernstige klachten hebben die gedurende langere tijd aanhouden en niet verminderen, neemt u dan contact op met uw therapeut zodat er overleg of een controleafspraak gemaakt kan worden.

Let op dat bij veranderingen aan de thoraxbandage die niet door de fabrikant zijn uitgevoerd, zowel de wettelijke garantie als de productaansprakelijkheid komt te vervallen. Tevens kunnen wij de werking en de duurzaamheid dan niet garanderen.

Eigenschappen

LYMPHATREX® compressiekleding is huidvriendelijk en veroorzaakt voorzover bekend geen allergische reactie.

Indicaties

De compressiekleding LYMPHATREX® kan gebruikt worden voor de volgende indicaties:

- lymfoedeem
- lipoedeem
- lip-lymfoedeem
- flebo lymfoedeem
- vernauwingen ten gevolge van immobiliteit (arthrogeen vernauwingssyndroom, paresen en gedeeltelijke paresen van het ledemaat)

Contra-indicaties

- vergevorderde perifere endarteritis obliterans
 - gedecompenseerd hartfalen
 - cardiogeen oedeem op grond van een hartzwakte
 - myocardinfarct
 - longoedeem
- Verdere relatieve contra-indicaties zijn:
- nattende huidziektes
 - niet-compatibiliteit met compressiemateriaal
 - gevoeligheidsstoringen
 - vergevorderde perifere zenuwaandoening
 - primair chronische polyarthritis

Bij niet naleving van deze contra-indicaties kan door Thuasne geen aansprakelijkheid worden overgenomen.

Was- en onderhoudsaanwijzing

Om de functionaliteit en kwaliteit van de kleding zo lang mogelijk te behouden, moet deze regelmatig gewassen worden.

Neem de volgende wasvoorschriften in acht;

1. Zo vaak mogelijk - indien nodig dagelijks - wassen ter verwijdering van vetresten.
2. Gebruik fijnwasmiddel, maar geen wasverzachter.
3. Geen chloorhoudende wasmiddelen gebruiken.
4. Vermijd gebruik van de droogtrommel.
5. De kleding niet uitwringen maar tussen een handdoek droopdeppen.
6. Stel de compressiekleding niet bloot aan directe warmtestraling,

bv. verwarming, direct zonlicht.



Om hygiënische redenen wordt het afwisselend dragen van twee thoraxbandages geadviseerd.

Let op; Gebruik geen bodylotion op de huid vlak voor het dragen van de thoraxbandage. Dit hoopt zich op in de vezels van het gebruikte materiaal en vermindert de werking en levensduur van de thoraxbandage.

Nabestelling

Uitgaande van het afwisselend dragen van twee thoraxbandages in een jaar dienen deze na een jaar vervangen te worden. Door het veelvuldig wassen en dragen treedt natuurlijke slijtage op, wat kan leiden tot verminderde compressie. Het is aan te raden om na een jaar een afspraak ter controle te maken met uw therapeut, bandagist of met Thuasne.

Samenstelling

LYMPHATREX® **Fine:**

49 % polyamide, 33 % tergal, 18 % elasthaan

LYMPHATREX® **Poly:**

82 % polyamide, 18 % elasthaan